

DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO

Indicazioni per prelievo di sangue

- Prelevare almeno 0.5 ml di sangue in provetta con anticoagulante (K3-EDTA).
- Riportare l'identificativo del cane (MICROCHIP) sulla provetta.
- Conservare la provetta di sangue mantenendola refrigerata fino all'arrivo in laboratorio.
- Consegnare al laboratorio la provetta con relativa documentazione (Modulo Certificazione Campione Biologico_Richiesta Deposito)

Indicazioni per "Deposito campione biologico" con allestimento di una kard

- Riportare l'identificativo del cane sulla Kard (MICROCHIP).
- Pungere l'interno del labbro del cane mediante un dispositivo di ago monouso.
- Aprire la Kard e saturare con le gocce di sangue circa la metà dell'area di raccolta (cerchio disegnato).
- Lasciare asciugare la zona campionata per almeno 30'.
- Chiudere la Kard e riporla insieme all'essiccante nell'apposita bustina (inclusi nel kit).
- Conservare a temperatura ambiente.
- Consegnare al laboratorio con relativa documentazione (Modulo Certificazione Campione Biologico_Richiesta Deposito)

